

HERZmed Umbettlaken GRIP
Einweg



HERZmed Umbettlaken GRIP - Einweg

Vielseitiges Umbettlaken - wasserundurchlässig, hygienisch und stabil.

Das HERZmed Umbettlaken GRIP ist für den kurzzeitigen **Einmalgebrauch** in Gesundheitseinrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Krankentransporten und Pflegeheimen entwickelt. Das Umbettlaken ist wasserundurchlässig und bildet eine physikalische Barriere gegen die direkte Übertragung von potenziell kontaminierten Keimen auf den Patienten.


Das HERZmed Umbettlaken GRIP ist ein vielseitiges Tuch mit **8 stabilen Handgriffen**, das sich nicht nur zum Heben, Tragen und Ziehen von Patienten bis 180 kg eignet, sondern auch hervorragend als wasserdichte Unterlage (Aufnahme ca. 2,8 Liter) und zum rückschonenden Transfer dient.

Auch erhöht sie den Komfort und das Wohlbefinden des Patienten während des Aufenthalts oder Transport.

Detailansicht

Vierschichtiger Aufbau des Umbettlakens:

1. das Gewicht tragende Vlies (nonwoven) wird mit
2. einer PE-Folie beschichtet (wasserundurchlässig)
3. eine Schicht mit absorbierenden Polymer
4. dünnes Vliesmaterial

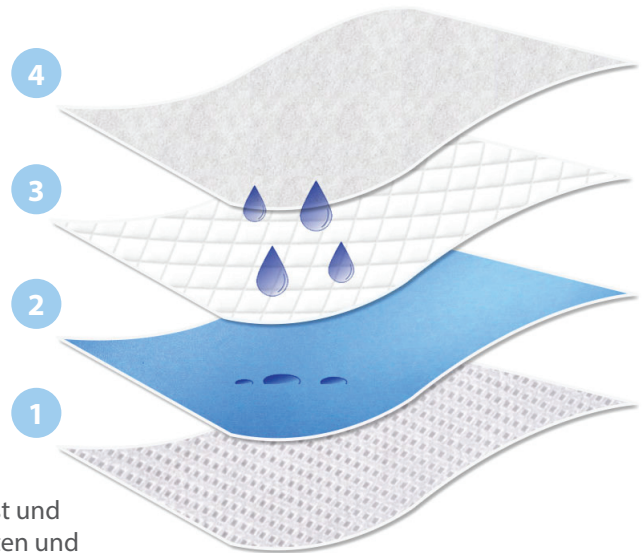

Anwendung

HERZmed Umbettlaken GRIP ist wasserundurchlässig, reißfest und leicht zu bedienen. Es dient als reine Umbetthilfe von Patienten und gleichzeitig als saugfähige Unterlage während des Transports von Patienten.

Den Patienten erst auf das Umbettlaken lagern und anschließend auf die Trage umbetten. Ein Patientenumbetten sollte nur auf kurze Distanz und in niedriger Höhe erfolgen. Für längere Distanzen oder einer Patientenbergung muss ein Rettungstuch verwendet werden.

Bereits auf dem HERZmed Umbettlaken gelagerte Patienten, können schnell und bequem mithilfe eines Rollboards von der Trage direkt auf ein Krankenhausbett transferiert werden.

Sicherheitshinweise:

HERZmed Umbettlaken GRIP darf nur als Umbettungshilfe zur Umlagerung der Patienten in kurzer Distanz und niedriger Höhe verwendet werden.

Es ersetzt kein Rettungs-/ Transporttuch oder Spineboard.

Bei Fehlanwendung besteht Verletzungsgefahr!



Vielseitiges Umbettlaken

Unterlage und Transfertuch mit Griffen in einem Produkt.

Griffe

Sicher und stabil dank den 4 Griffen auf beiden Seiten.

Stark

Tragfähigkeit bis 180 kg.

Wasserundurchlässig

Nimmt bis zu 2,8 l Flüssigkeit auf.

Maße

Größe: ca. 210 x 80 cm

Einzelverpackung

Schneller und sauberer Einsatz.
Einzel im Vakuum verpackt.

Hygienische Arbeitsumgebung

Die Verwendung des **Umbettlaken GRIP EINWEG** gewährleistet höchste hygienische Standards. Zudem erhöht sie den Komfort und das Wohlbefinden während des Aufenthalts oder des Transportes des Patienten. Die Entsorgung erfolgt über den normalen Müll.

Bei dem Produkt handelt es sich um ein **Einwegprodukt!**

Technische Spezifikationen

Größe:
ca. 210 x 80 cm

Gewicht:
ca. 200 g

Farbgebung:
Blau

Verpackung/VPE:
Stück einzeln Vakuum verpackt
Decke gefaltet ca. 50 x 20 mm
Karton = 20 Stück
Kartonmaße: 46 x 38 x 29 cm
Palette = 20 Kartons = 400 Stück

Lagerung: Trocken aufbewahren
Entsorgung: im normalen Hausmüll

Material:

1. Vlies (nonwoven) wird mit
2. PE Folien (wasserundurchlässig)
3. Absorbierendes Polymer
4. dünnes Vliesmaterial


Sterilität: Nein
Einmalprodukt: Ja

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Beschreibung	Gramm
100050	HERZmed Umbettlaken GRIP	ca. 200 gr.

GTIN 04251697702661 - Einzel-Verpackung (1 Stück):
GTIN 04251697702654 - Verpackung-Karton (20 Stück):

Bestellung und Beratung durch:

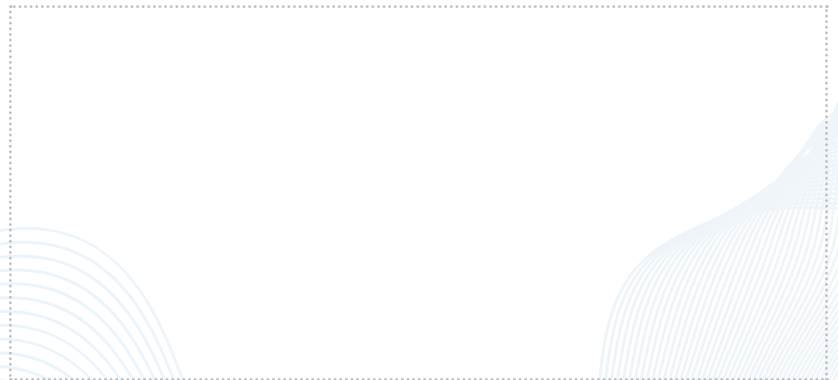

HERZmed GmbH
Herkulan-Schwaiger-Gasse 16
82487 Oberammergau
Tel.: +49 (0) 911 / 14 88 959 - 0
Fax: +49 (0) 911 / 14 88 959 - 9
Mail: herzmed@herzmed.de
Web: www.herzmed.de

Die dargestellten Produkte sind nur ein Auszug unseres Produktsortimentes. Genaue Details und Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.herzmed.de. Alle mit einem Stern gekennzeichneten Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers. Für Irrtümer, mögliche Druckfehler und Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie ebenfalls unter www.herzmed.de einsehen können.

